



Simply mobile.

viamobil[®]eco

Napęd do wózka




Pchanie wózka -
to takie łatwe.



Nowy, prostszy sposób na sterowanie wózkiem

Pchanie i hamowanie wózka jeszcze nigdy nie było tak proste. Pod górę lub z góry, na stromych podjazdach, na pochyłych drogach lub podczas dłuższych podróży, napęd Viamobil Eco - elektryczne wspomaganie pchania i hamowania wózka - wspomaga asystentów, opiekunów osób z niepełnosprawnością w manewrowaniu wózkiem w najbardziej newralgicznych momentach.

Przegląd elementów Viamobil Eco:

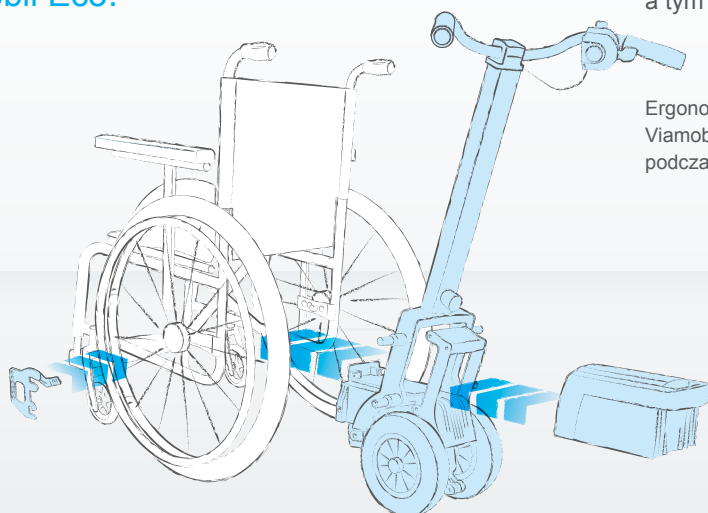

Viamobil Eco zapewnia również bezpieczeństwo podczas zjazdów ze wzniesień, a funkcja automatycznego hamowania jeszcze bardziej potęguje to poczucie pewności i bezpieczeństwa. Inteligentny system sprężyn zapewnia wygodną i cichą jazdę, automatycznie kompensuje wszelkie nierówności i niedogodności na powierzchni drogi przez nieustanny kontakt kół z podłożem.

Korzyści z użytkowania napędu to nie tylko odciążenie opiekuna, ale również osobista swoboda zarówno opiekuna jak i użytkownika, a tym samym zwiększenie szansy na kontakt społeczny.

Ergonomiczna **kierownica** z szerokim wahaczem sprawia, że Viamobil Eco jest łatwy w obsłudze i nie wyczerpuje się nawet podczas dłuższych podróży.

Kompaktowy **akumulator** ze zintegrowanym gniazdem ładowarki łatwo łączy się z jednostką napędową bez wtyczki lub kabla.

Mocny **silnik** radzi sobie z wzniesieniami i zjazdami o nachyleniu do 10%. Pneumatyczne zawieszenie zapewnia, że odporne na przebiecie koła napędowe utrzymują doskonały kontakt z podłożem, co zwiększa komfort jazdy.



*Wychodne,
znowu razem –
to takie proste!*



Wszystko pod kontrolą

Wszystkie funkcje są kontrolowane za pomocą pokręteł. To daje optymalną łatwość użytkowania.



Sterowanie kciukiem

Dźwignię napędową umocowaną na ergonomicznie ukształtowanym panelu sterowania można lekko wcisnąć za pomocą kciuka, aby ruszyć wózek w przód. Dzięki czemu, nawet dłuższe spacerowanie nie są męczące. Dźwignię należy lekko unieść, aby przejść do tyłu.



Wygodny i bezpieczny

Pneumatyczne zawieszenie Viamobil Eco pokonuje gładko wszystkie nierówności i zapewnia komfortową jazdę. Oferuje również stały kontakt koła z podłożem, aby zagwarantować bezpieczne prowadzenie na zboczach i podjazdach.

Po prostu prostu postaw na Viamobil Eco.

Pchanie wózka może być niezwykle łatwe - to fakt potwierdzony przez TÜV, niezależną organizację, która testuje jakość i niezawodność produktów. Pod przewodnictwem TÜV, łatwość obsługi Viamobil Eco została gruntownie zbadana z pomocą użytkowników. Na koniec otrzymała ocenę „Prosty w obsłudze” (Simple to operate)”.



MADE IN GERMANY

Idealny do transportu

Viamobil Eco demontuje się w ciągu kilku sekund na trzy części, bez użycia narzędzi. Napęd pasuje do każdego rodzaju bagażnika samochodowego.



Dopasowany do Twojego wózka

Viamobil Eco pasuje do większości standardowych wózków, a dzięki dobrze zaprojektowanemu systemowi zaczepów łatwo mocuje się do wózka bez użycia narzędzi. Wózek zachowuje pełną funkcjonalność (np. składanie), a komfort i mobilność znacznie wzrastają.

Technical data viamobil eco V14

Ładowność:	120 kg (waga osoby)** Bezstopniowa regulacja
Prędkość:	1– 5,5 km / h
Zasięg:	12 km *
Możliwe nachylenie:	10 %
Waga:	Akumulator 5,7kg Napęd 10,5 kg Jednostka sterująca 2,0 kg
Maks. waga całkowita:	Maks. 170 kg **

(Viamobil Eco, wózek inwalidzki, osoba na wózku)

* W zależności od obciążenia, terenu, temperatury otoczenia zgodnie z ISO 7176-4

** Możliwe są ograniczenia w zależności od modelu wózka inwalidzkiego i stopnia pomocy osoby asystującej

Viamobil Eco to zatwierdzone urządzenie medyczne. Twój sprzedawca chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące zwrotu kosztów.

Viamobil Eco jest zgodny z dyrektywą 93/42 / EWG dotyczącą wyrobów medycznych i został dobrowolnie skontrolowany przez TÜV Süd zgodnie z aktualną wersją normy produktu EN 12184.

Nasze roszczenia co do jakości stanowią gwarancję bezpieczeństwa! Nasza firma jest certyfikowana zgodnie z najnowszymi standardami zarządzania jakością (w tym z najnowszymi, odpowiednimi poprawkami) określonymi w ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Dzięki naszemu systemowi zarządzania środowiskowego, certyfikowanemu zgodnie z ISO 14001, zapewniamy, że produkcja naszych produktów jest przyjazna dla środowiska.



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21 72461
Albstadt, Niemcy
Telefon +49 07432 2006-0
Fax +49 07432 2006-298
info@alber.de



"PARTNER" Szmidt-Banyś Sp.J.

ul. Chorzowska 30C
41-910 Bytom
tel. +48 516293265
Tel: 32 733 7999 lub 32 787 40 86
E-mail: biuro@kuschall.eu

www.alber.de